

SKINTESTER INTELLIGENZA ARTIFICIALE

////// **VENDITA**

Aumenta le Vendite e Fidelizza i Tuoi Clienti con Soluzioni Personalizzate



INNOVAZIONE E SEMPLICITA'


Innovazione per la tua bellezza, semplicità per il tuo lavoro

Progettato per agevolare le vendite per estetisti, centri estetici, beauty salon, parrucchieri e oltre


15 parametri della pelle analizzati in modo professionale e oggettivo



8 tecnologie di imaging spettrale integrate per un'analisi cutanea avanzata

Operazioni rapide e flessibili: cattura immagini e genera report con un solo clic

SKINTESTER IN DETTAGLIO

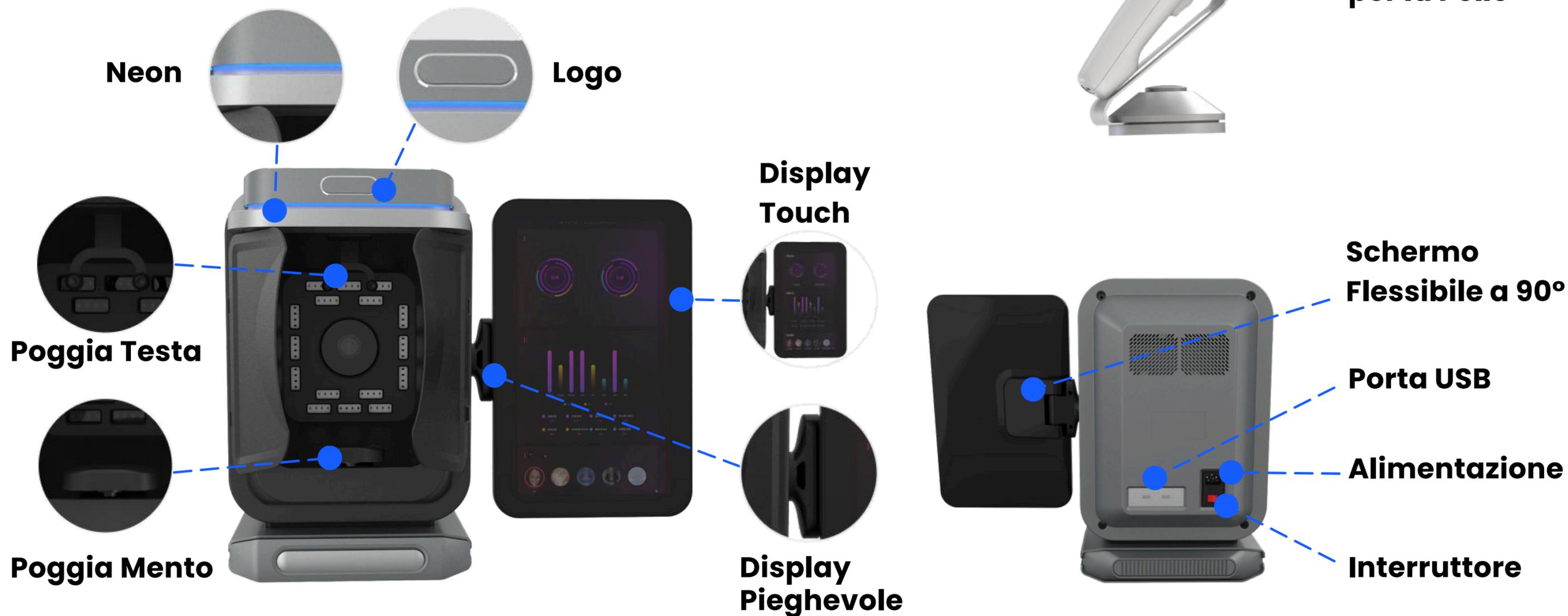

10 CARATTERISTICHE UNICHE

ANALISI PROFESSIONALE

3 SPETTRI DI RICERCA

15 PARAMETRI CUTANEI

2 MODALITA' DI ANALISI

REPORT PERSONALIZZATI

CONSIGLIA I TUOI PRODOTTI

8 IMMAGINI A SPETTRO

GESTIONE DATI CLIENTI

ADATTAMENTO RISULTATI

100% PERSONALIZZABILE



OTTO IN UNO



01

02

03

04

05

06

07

08

Luce Bianca

Luce Polarizzata Incrociata

Luce Polarizzata Parallela

Luce di Wood

Luce Uv

Mappa di Distribuzione del Rossore

Mappa Marrone

Mappa Bianca


TRE ANALISI IN UNO



Le nostre skintesters sono le prime e uniche al mondo a fare un'analisi di tutto il viso



VISO SINISTRO

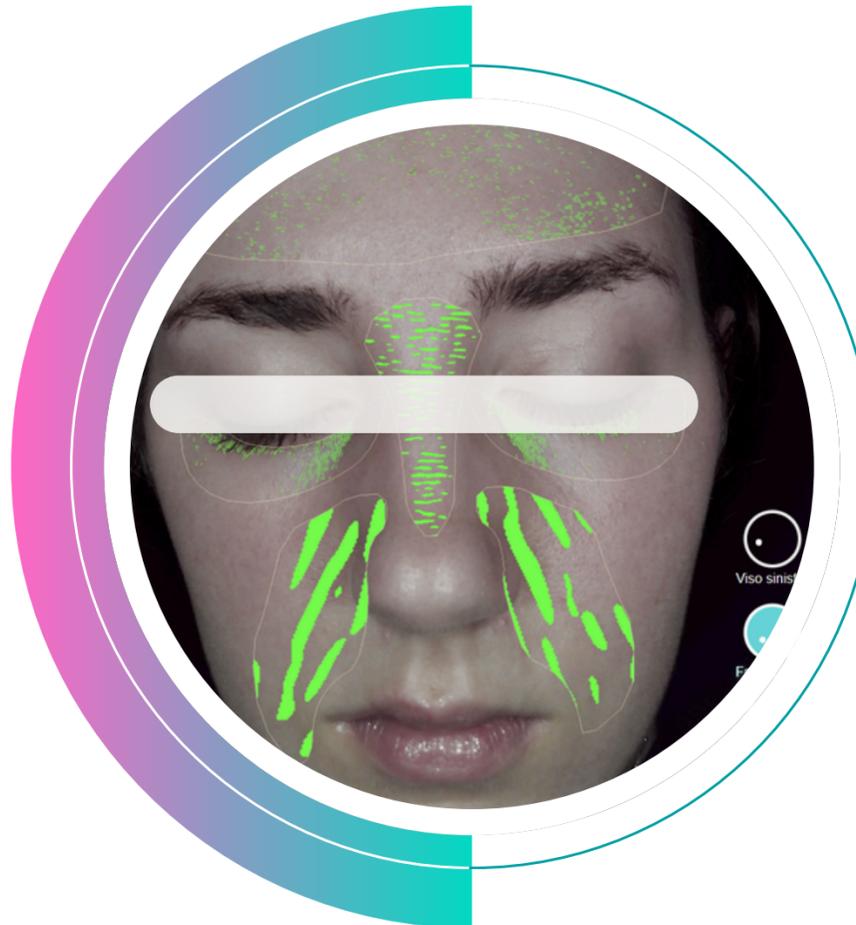

VISO DRITTO




VISO DESTRO

DUE LIVELLI DI ANALISI

**MACRO ANALISI**

La polarizzazione negativa penetra più in profondità, rivelando aspetti della pelle non visibili a occhio nudo, come i vasi sanguigni, le macchie pigmentarie interne e le aree di infiammazione. Questa modalità è perfetta per una analisi macro, che fornisce una visione più ampia e profonda delle condizioni della pelle

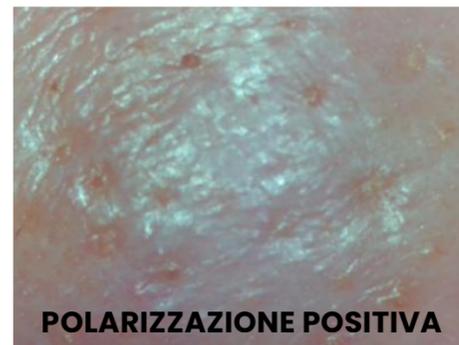

La polarizzazione positiva è una tecnologia che permette di analizzare la superficie cutanea in modo dettagliato, evidenziando le imperfezioni superficiali come rughe, pori dilatati e texture della pelle. Questa modalità è ideale per una analisi micro, ovvero per osservare i dettagli più fini della pelle

**MICRO ANALISI**

PARAMETRI CUTANEI



CONTROLLO TOTALE E GUADAGNI AUMENTATI




**Registrazione
Anonima
in Cloud**

**Gestione
integrata su
più
dispositivi**

**Inserisci i
Tuoii Prodotti
e i Tuoii
Trattamenti**

**Gestione
Semplice
ed
Intuitiva**

QUALI SONO I VANTAGGI

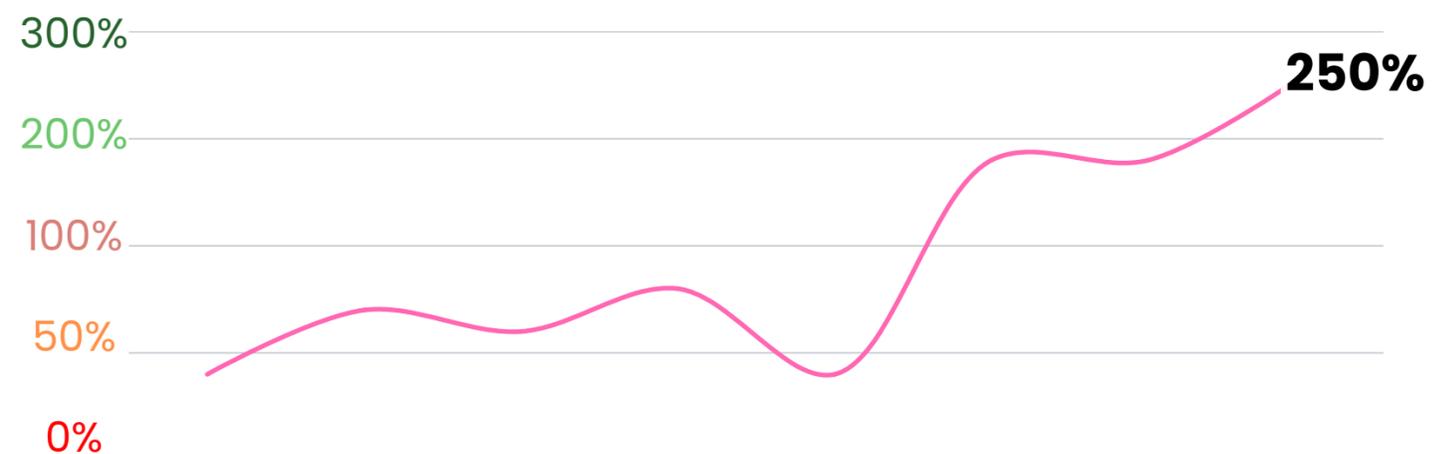

Di Guadagno Rispetto all'Investimento Iniziale

Grazie al nostro A.I. Skin Tester, abbiamo registrato un incremento medio del 250% nelle vendite di prodotti e servizi per la cura del viso.

Risultati straordinari per il tuo business!

Aumenta le Vendite


Unisciti ai numerosi clienti che hanno usufruito dei nostri servizi per aumentare la vendita dei tuoi prodotti e dei tuoi trattamenti



250%

100% Soddisfazione Clientela

I clienti che hanno eseguito il test del viso presso i centri autorizzati si sono detti soddisfatti al 100% dell'utilizzo della nostra A.I. SkinTester

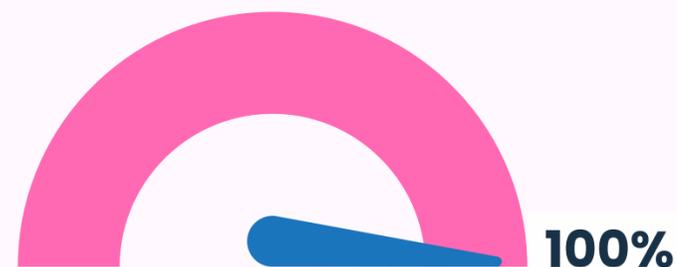

100%

5/5 Valutazione Prodotto

I clienti che hanno acquistato o noleggiato il nostro A.I. Skin Tester hanno assegnato 5 stelle su 5 in ogni categoria, confermando l'eccellenza del nostro prodotto


5/5



RISULTATI DEI TEST PER CLIENTE

VISUALIZZAZIONE AI SKINTESTER


REPORT CLIENTE SCANNERIZZATO DA QR CODE

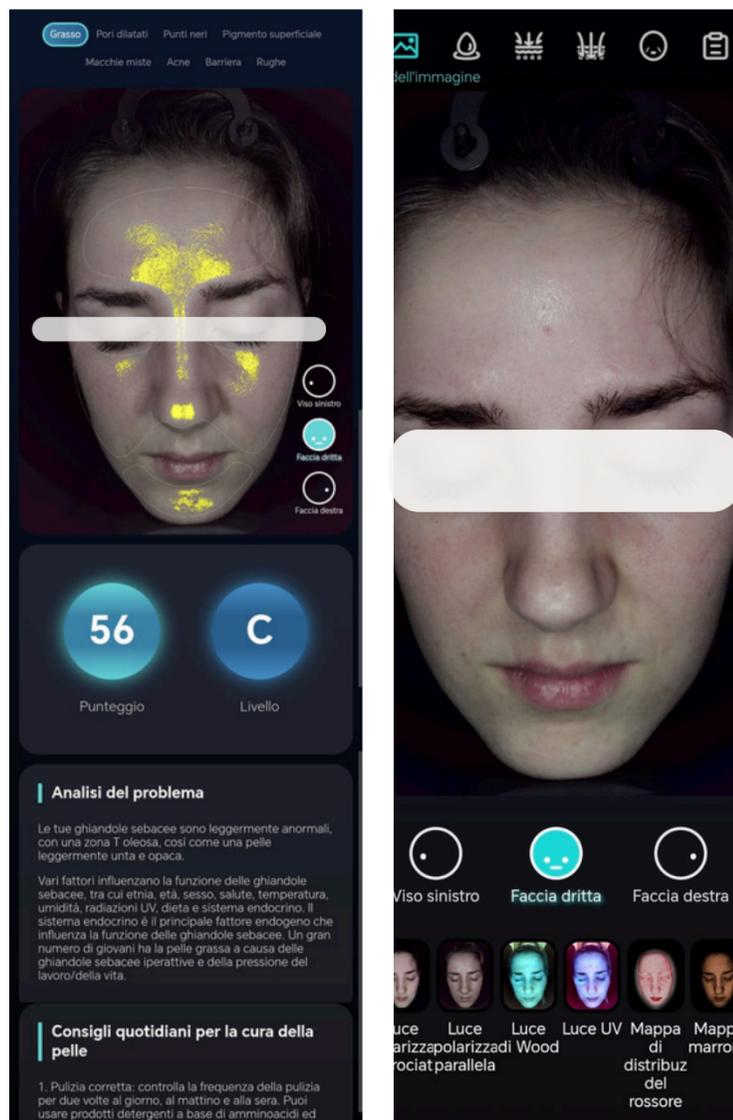


Mostra i risultati dettagliati del test cutaneo

Ogni scansione, accessibile tramite QR code, fornisce un report personalizzato per aiutare i clienti a comprendere le esigenze specifiche della loro pelle e per consigliare i prodotti e i trattamenti adeguati alla tua clientela.

I Report sono Comparativi

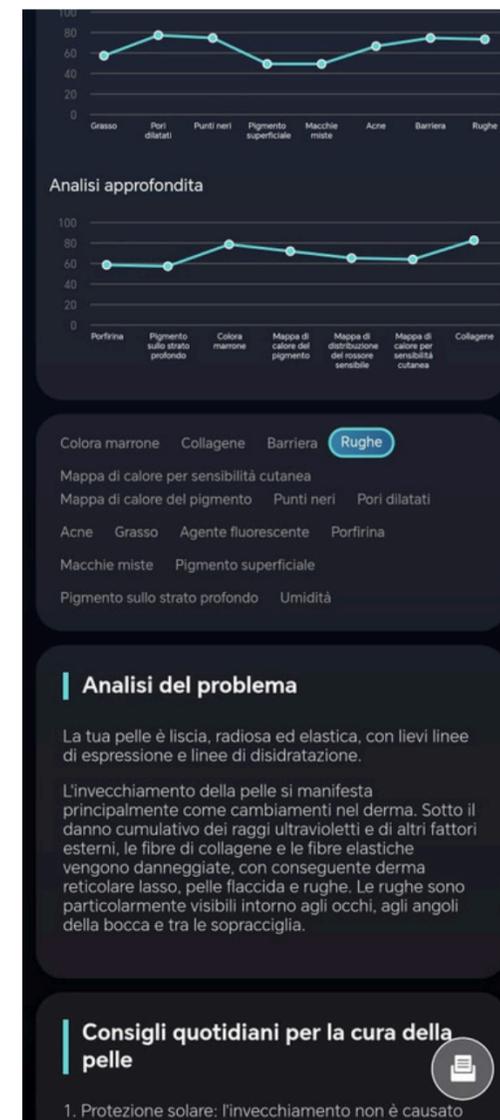

ANALISI SPETTRALI - LUCE BIANCA

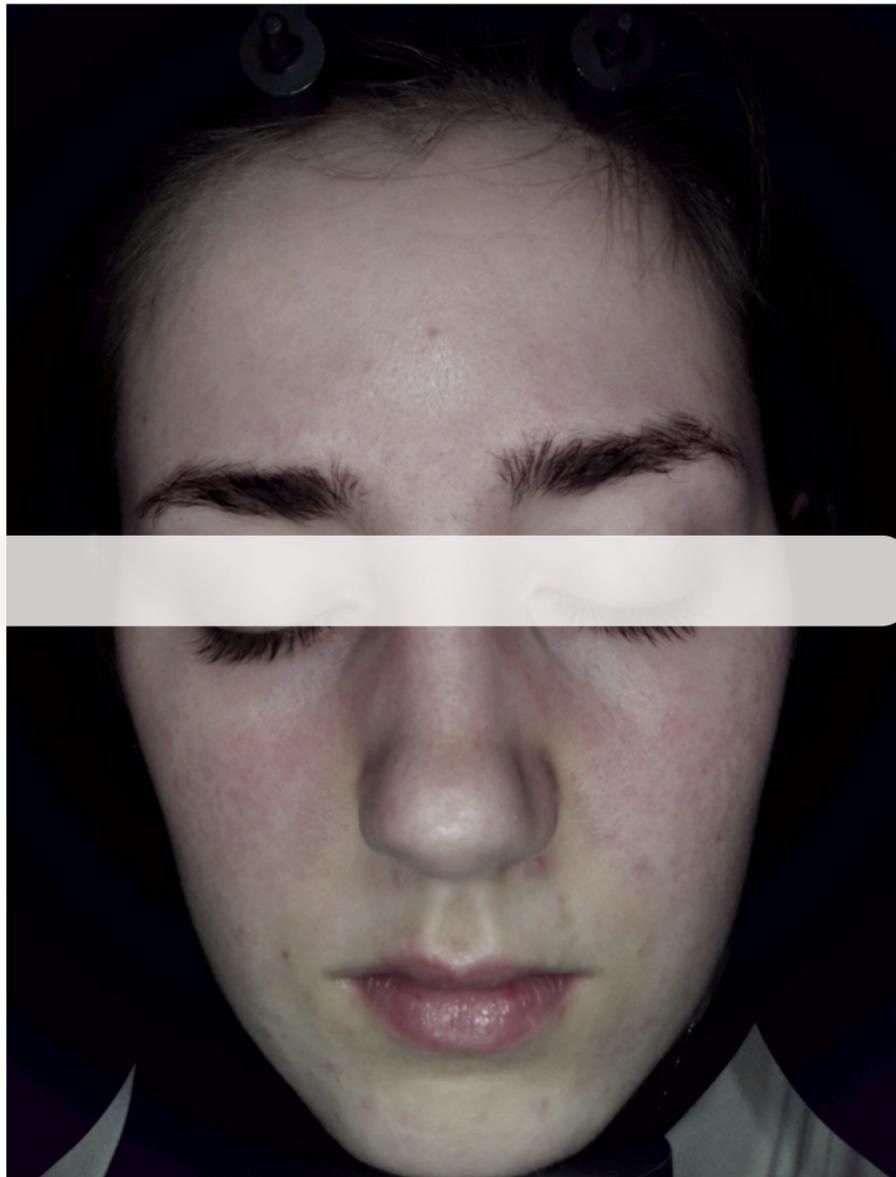
**LUCE BIANCA**

La luce bianca viene utilizzata per rilevare imperfezioni cutanee visibili a occhio nudo ed è il riferimento per confrontare e validare i dati ottenuti dalle immagini spettrali. Cosa Identifica?

- Pigmentazioni (melaniche e non-melaniche)
- Lesioni attive (papule pustolose, comedoni)
- Alterazioni strutturali (pori dilatati, atrofie)
- Rughe dinamiche/statiche

**BRUFOLO****MACCHIE****RUGHE****PORI**

ANALISI SPETTRALI - LUCE POLARIZZATA INCROCIATA

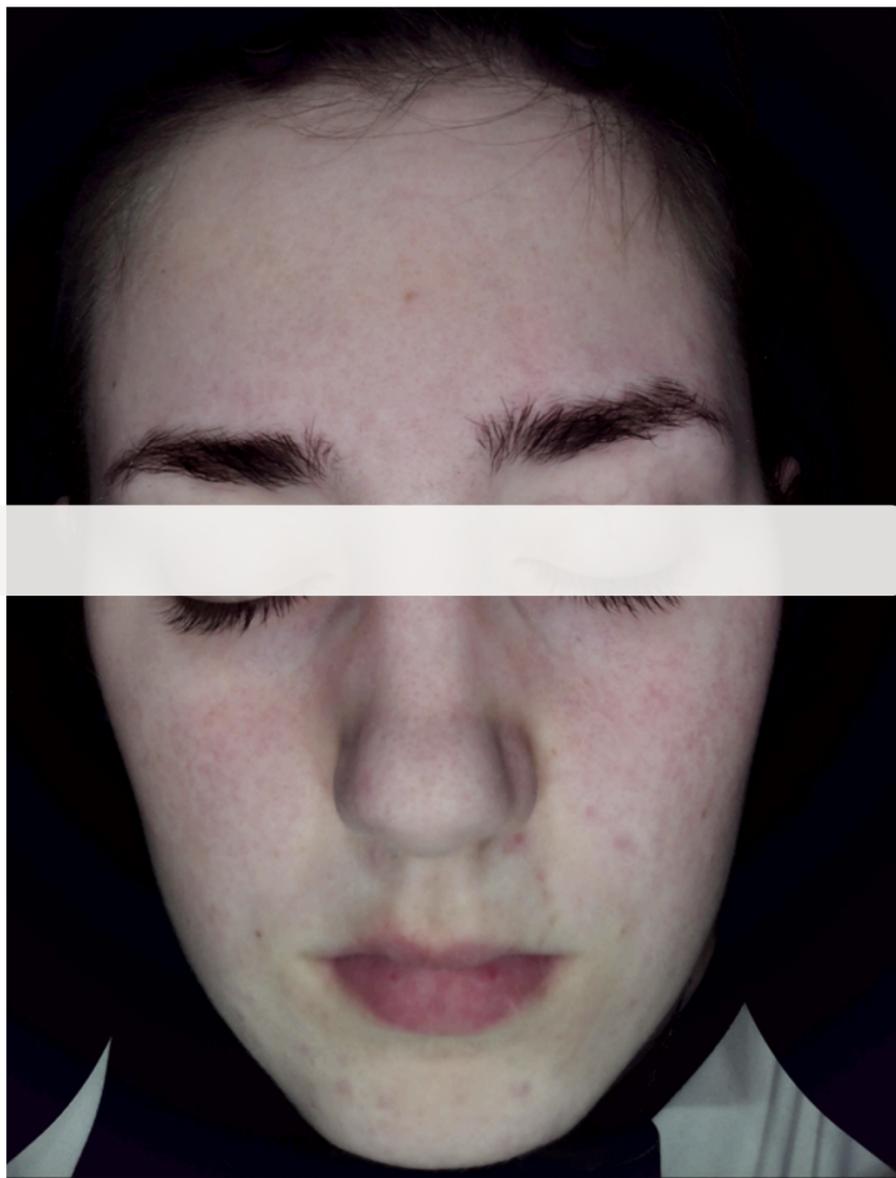

LUCE POLARIZZATA POSITIVA

La luce polarizzata incrociata analizza i dettagli superficiali della pelle con un'analisi precisa per la quale è possibile analizzare con precisione:

- Levigatezza della pelle
- Micro-rughe e linee sottili
- Imperfezioni della pelle come pori dilatati, cicatrici, acne, irregolarità



BRUFOLO



FERITE




RUGHE



PORI

ANALISI SPETTRALI - LUCE POLARIZZATA PARALLELA

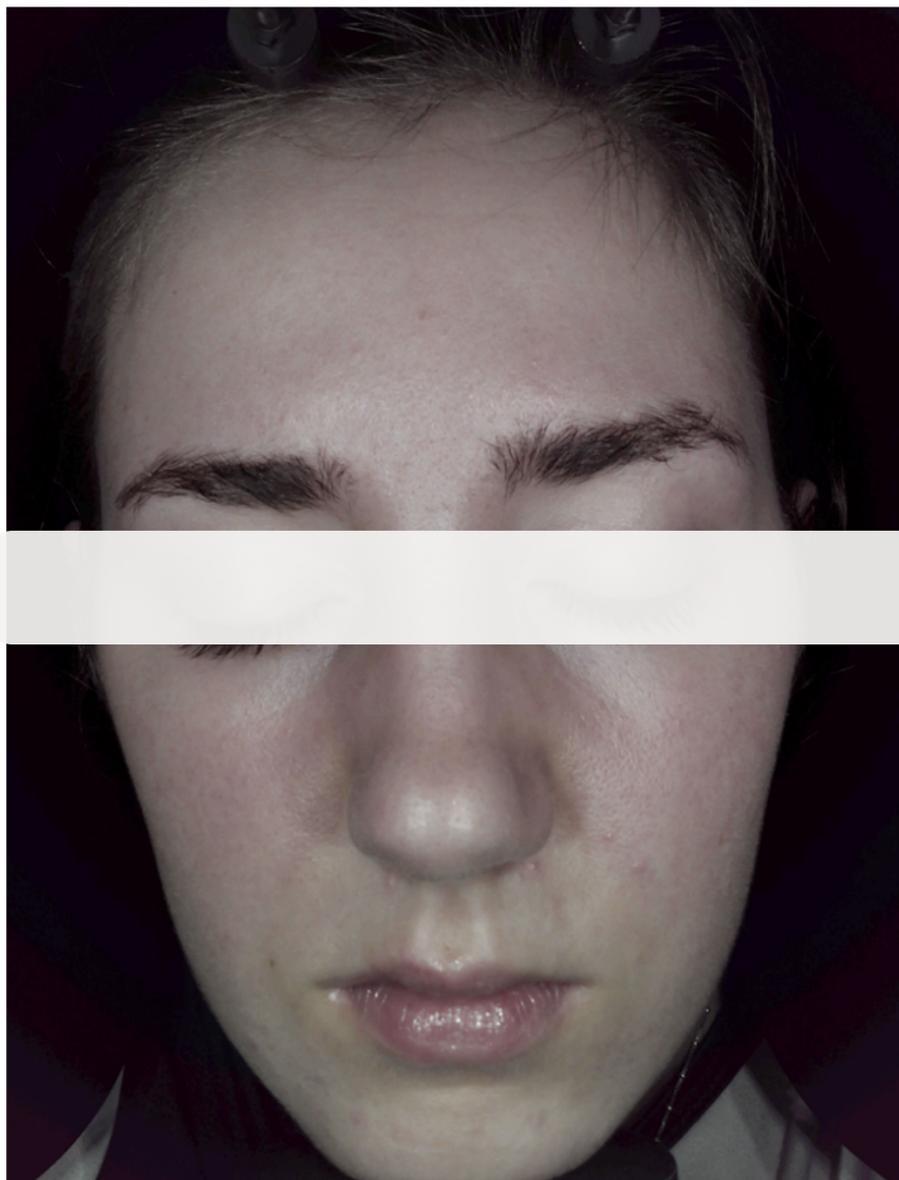

LUCE POLARIZZATA NEGATIVA

La luce polarizzata parallela filtra selettivamente i riflessi superficiali, isolando la luce che penetra in profondità nella pelle. Questo permette di analizzare:

- Pigmentazioni
- macchie marroni, discromie, tonalità rossastre
- Vasi sanguigni (capillari dilatati, couperose)
- Infiammazioni (acne attivo, eritemi)
- Uniformità del tono cutaneo



ERITEMI



FERITE




ACNE



V.SANGUIGNI

ANALISI SPETTRALI - LUCE DI WOOD

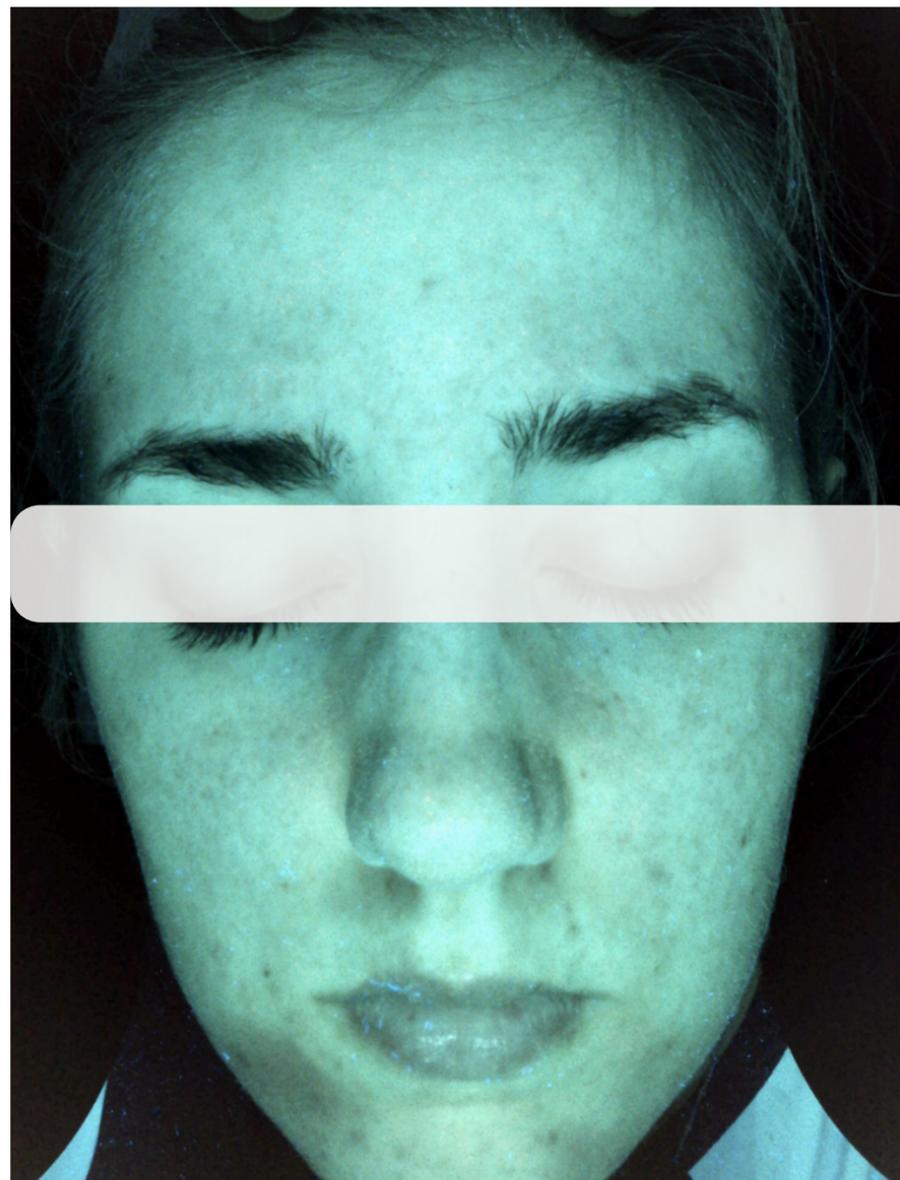

LUCE DI WOOD

La Luce di Wood emette onde UV specifiche (365nm) che interagiscono con i pigmenti dermici e così la melanina profonda assorbe la luce senza fluorescenza e crea un contrasto netto tra aree pigmentate e tessuto sano, tramite il quale avremo:

- Mappatura precisa della melanina profonda
- Identificazione di iperpigmentazioni subdermiche
- Differenziazione tra pigmenti epidermici e dermici
- Rilevamento precoce di discromie incipienti



DISCROMIE



MACCHIE




SUBDERMICA




PIGMENTAZIONE

ANALISI SPETTRALI - LUCE UV

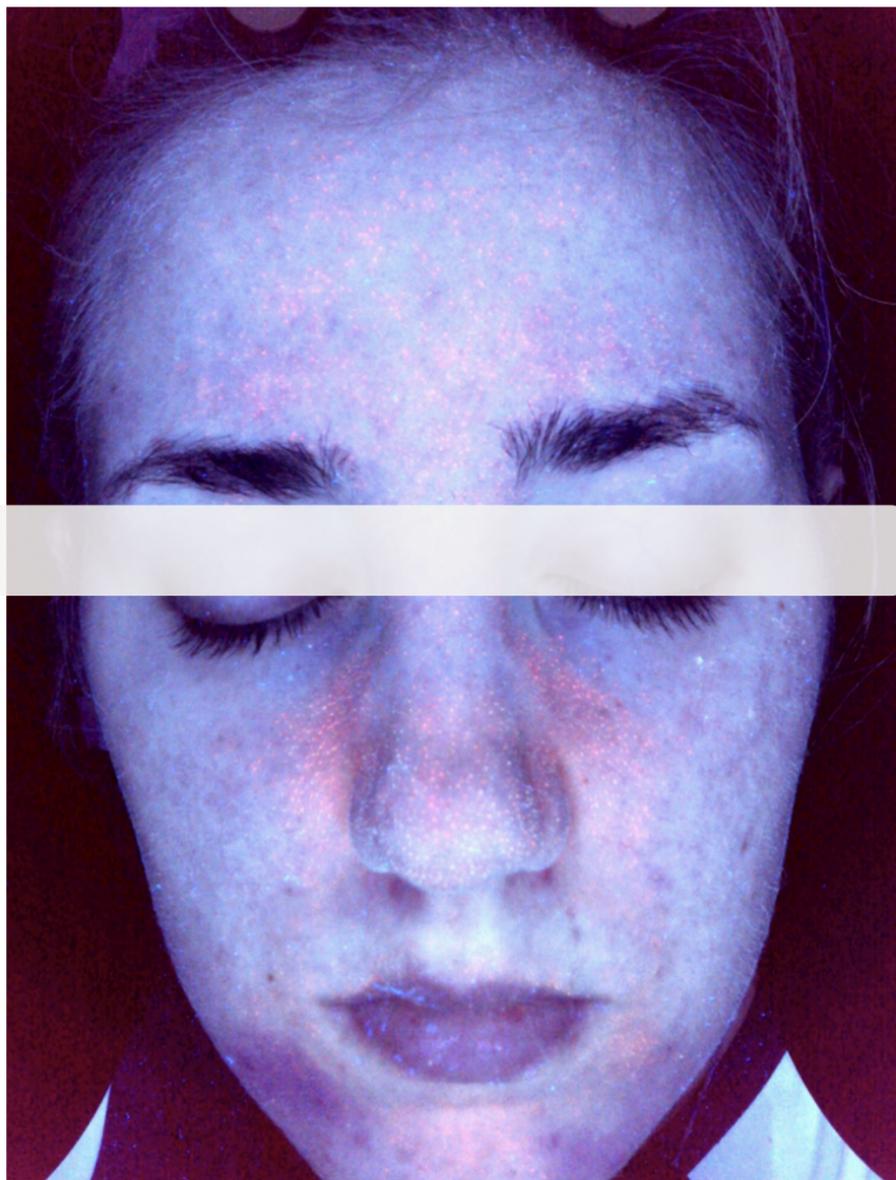
**LUCE SPOT UV**

La luce SPOT UV (365nm) interagisce con la bilirubina cutanea inducendo un effetto di fluorescenza violacea. Questo fenomeno fisico-chimico permette una mappatura precisa della distribuzione della bilirubina e una valutazione dei depositi pigmentari oltre a:

- Dermatosi pigmentarie (iperbilirubinemia cutanea)
- Disfunzioni del sistema porfirinico (porfirie)
- Infezioni batteriche con accumulo di metaboliti
- Alterazioni del microcircolo superficiale

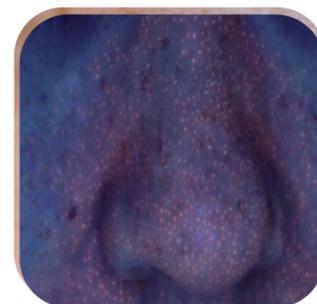**PORFIRIE****METABOLITI****FLUORESCENZA****BILIRUBINEMIA**


ANALISI SPETTRALI - MAPPA DISTRUBUZIONE DEL ROSSORE

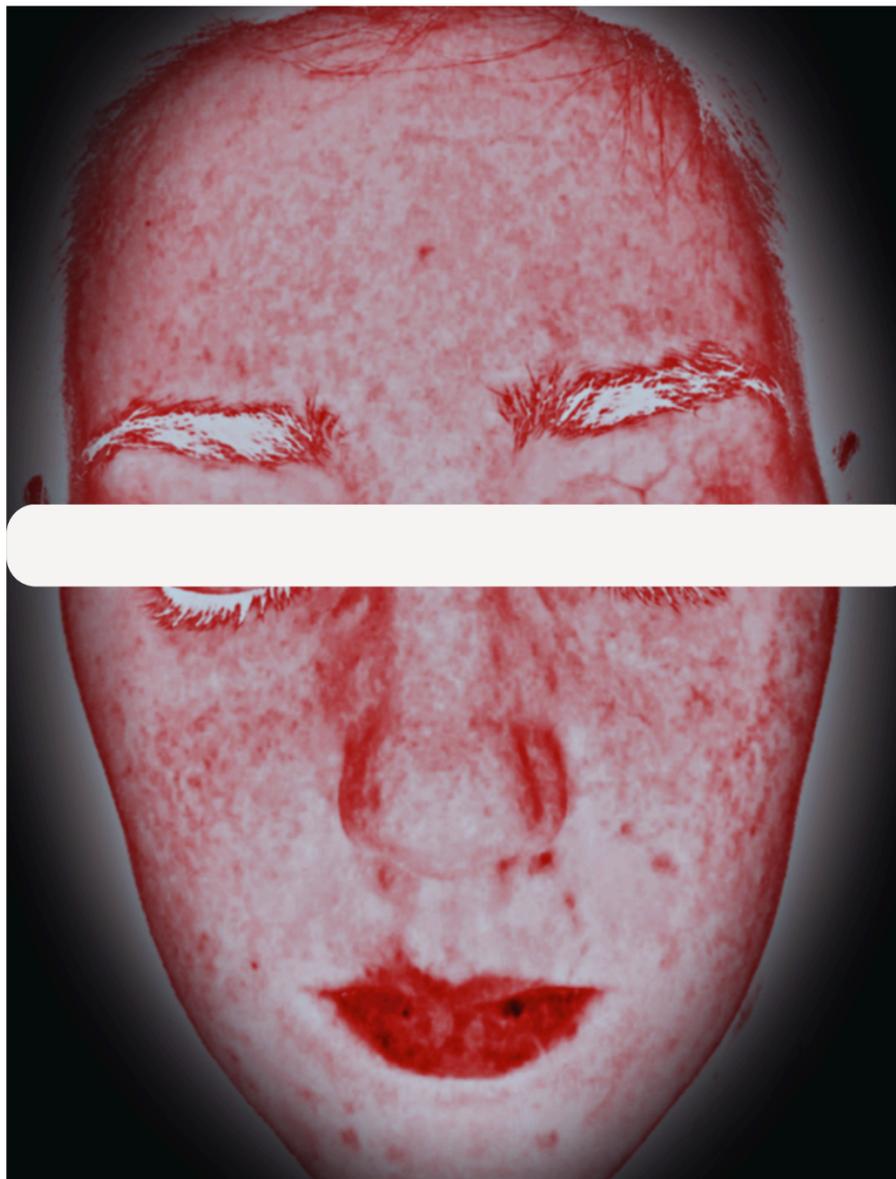

DISTRIBUZIONE DEL ROSSORE

La tecnologia sfrutta lunghezze d'onda specifiche per rilevare l'emoglobina sottocutanea (ossigenata e deossigenata) e mappare i depositi infiammatori (pigmenti rossi e marroni) Identificare le alterazioni vascolari. Questo spettro analizza:

- Infiammazioni attive (eritema, acne, dermatiti),
- Condizioni di sensibilità cutanea (rossori, couperose)
- Lesioni vascolari (capillari dilatati, micro-emorragie)
- Pigmentazione post-infiammatoria (macchie residue da acne o traumi)

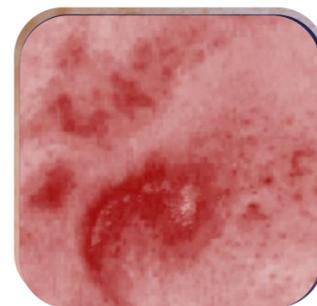

LESIONI



SENSIBILITA'




ACNE



INFIAMMAZIONE

ANALISI SPETTRALI - MAPPA MARRONE

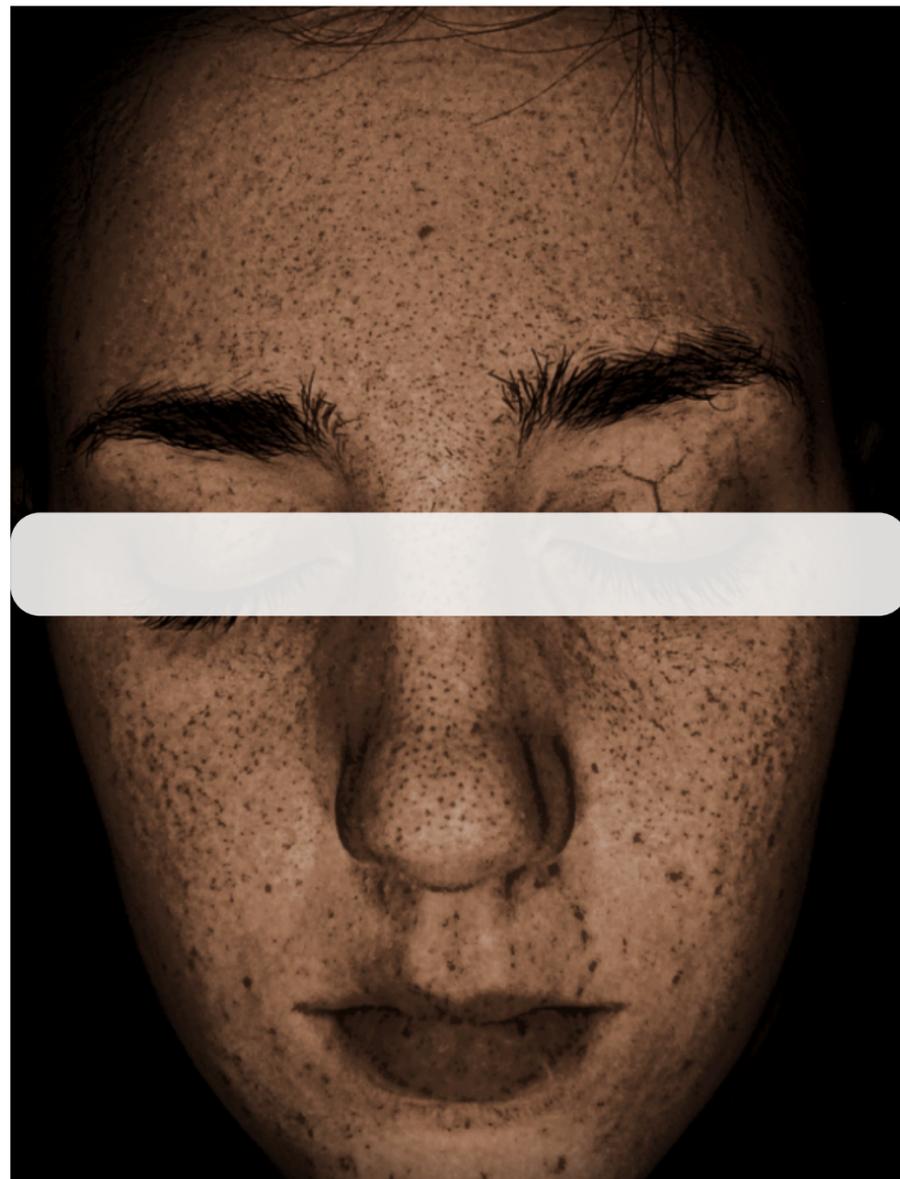

MAPPA MARRONE

La sorgente luminosa RBX rileva l'accumulo subepidermico e i danni cumulativi da radiazioni UV, quantifica l'estensione del fotoinvecchiamento con la distribuzione topografica delle lesioni, la forma, i contorni, il livello di profondità e di concentrazione delle macchie

- Danno attuale da esposizione solare e discromie
- Mappatura tridimensionale dei depositi di melanina
- Dati quantitativi sul foto-danno accumulato
- Parametri morfologici delle lesioni pigmentate



LENTIGGINI



LESIONI




NEO



FOTO-DANNO

ANALISI SPETTRALI - MAPPA BIANCA

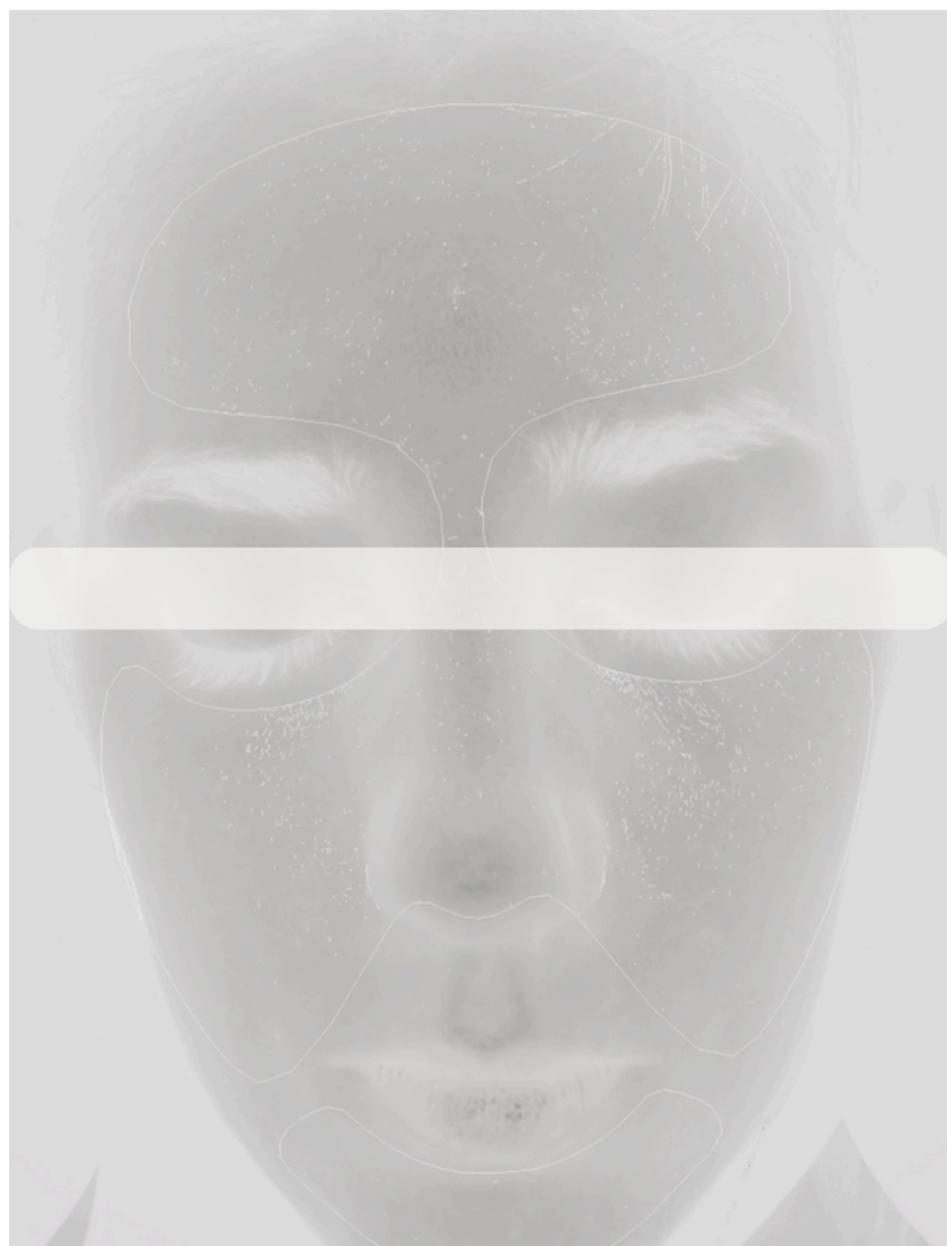

MAPPA BIANCA

L'analisi con luce polarizzata a mappa bianca rivela le microstrutture superficiali (rilievi, pori, desquamazione) e la densità del collagene (valutazione indiretta tramite opacità e dispersione luminosa), analizzando:


- Alterazioni della matrice dermica (fibrosi, perdita di elasticità)
- Indice di ruvidità (scala quantitativa)
- Distribuzione del micro-relief (mappatura 3D)
- Aree di degenerazione collagene (ipo/iper-riflettività)



ELESTICITA'



RUVIDITA'

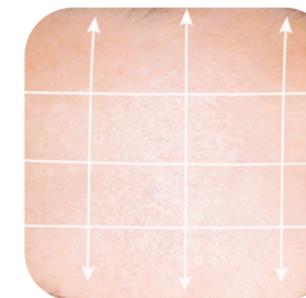

MAPPATURA



COLLAGENE

PERCHÈ SCEGLIERE A.I. SKIN TESTER?

1

Maggior Efficienza Produttiva

Con l'AI Skintester, i tempi di ispezione della pelle si riducono drasticamente, permettendo alla tua azienda di aumentare la produttività senza compromettere la qualità

2

Riduzione degli Errori Umani

Grazie all'intelligenza artificiale, garantiamo una valutazione precisa e consistente, eliminando gli errori di giudizio e migliorando la qualità delle tue analisi e la soddisfazione del cliente

3

Distinguiti e Fai la Differenza

Distinguiti sul mercato offrendo un'analisi di altissima qualità, con il prodotto A.I. Skin Tester più venduta nel 2025. Una Precisione impeccabile che soddisfa anche i clienti più esigenti

4

Fidelizza la Clientela

Consenti ai tuoi clienti di scoprire la propria pelle, confrontando il prima e dopo dei tuoi trattamenti e dimostrandone l'efficacia grazie all'analisi avanzata dello Skintester

5

Assistenza Senza Limiti

Offriamo un'assistenza 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 per garantirti supporto immediato e risolvere qualsiasi esigenza in modo tempestivo e professionale. Garanzia Italia Commerciale Classica pari a 12 mesi

Grazie

per la Vostra Attenzione



Informazioni di Contatto



351. 726.14.67



www.kocci.vip



info@kocci.vip



Bergamo, Italia
